

Evità Ginecologico

Unguento vaginale

Tubo da 30g con 6 applicatori vaginali monouso

Composizione

Ogni somministrazione da 5 g contiene: Vitamina E acetato 1250 mg; Olio di mandorle dolci 1000 mg; Burro di Karitè 750 mg; Insaponificabile di olio d'oliva 100 mg; E. L. di Hypericum Perforatum; E. L. di Aloe Barbadosis; Lecitina; Tocoferolo; Vitamina C palmitato; Olio di girasole; Acido citrico; PEG-18 glyceryl oleate/cocoate; Stearato di glicerile; Trigliceride caprilico/caprico; Olio di ricino idrogenato.

Categoria di appartenenza

Dispositivo Medico.

Indicazioni

Unguento lubrificante, lenitivo della mucosa vaginale indicato:

- per il trattamento della secchezza della mucosa vaginale e vulvare;
- per la lubrificazione della superficie esterna (senza cannula) anale o vaginale per facilitare l'inserimento di dispositivi.

Posologia e modo di somministrazione.

Come lubrificante della mucosa vaginale: 1 applicazione vaginale per 6 gg. consecutivi o secondo parere medico;

Come lubrificante della superficie esterna anale o vaginale per facilitare l'inserimento di dispositivi: distribuire l'unguento senza uso della cannula.

Modalità di applicazione con cannula

1. forare il tubo utilizzando il perforatore del tappo di chiusura
2. avvitare un applicatore vaginale
3. premere il tubo sino al riempimento totale dell'applicatore
4. svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere il pistone fino a termine della sua corsa
5. estrarre l'applicatore e lo stantuffo, le cannule sono monouso

Avvertenze

L'applicatore (cannula) è monouso. Gettare la cannula dopo l'applicazione.

Uso topico

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per instaurare idonea terapia.

Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.

Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco ed asciutto.

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Non ingerire.

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Lavarsi le mani dopo l'uso.

Non utilizzare su ferite.

Revisione: Luglio 2015



Fabbricante:



Interfarmac Srl - Via Pederzana, 8/2,
40055 Castenaso (BO)
info@interfarmac.it